

# 9016-103-98

## SPRAY FROID

### APPLICATIONS

- ✓ Le spray froid s'utilise pour le traitement des traumatismes sportif type contusions, entorses et foulures.

### MODE D'EMPLOI

- ✓ Vaporiser sur la peau à une distance d'au moins 15cm
- ✓ Arrêter la pulvérisation quand un léger givre blanc apparait sur la peau
- ✓ Ne pas pulvériser sur une plaie, près des yeux ou des muqueuses

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- ✓ Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer.
- ✓ Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

### CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : menthe
- ✓ Aspect : liquide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Densité : 0.85
- ✓ gaz : butane/propane

### ATOUTS :

- ✓ Grâce à son effet froid, elle permet de soulager rapidement la douleur, de limiter l'apparition d'hématomes et d'aider à réduire la tuméfaction
- ✓ Laisse une délicate odeur de menthe

